



BRAUN

ThermoScan 3

Infrared Ear Thermometer

百靈耳溫槍

IRT 3030



Gentle & accurate
輕柔, 準確



High speed
高速



Audio fever indicator
發燒響聲指示

Functions / 功能 :



Use a clean disposable hygienic lens filter with each measurement :

- 1) to ensure hygienic use
- 2) to protect your child from cross-contamination
- 3) to ensure earwax residues do not impact accuracy of the reading.



每次測量體溫均應使用潔淨的一次性耳套 :

- 1) 以確保衛生
- 2) 防止孩子交叉感染
- 3) 防止耳垢影響測量的準確度。



Braun ThermoScan compact one second ear thermometer.

百靈 ThermoScan 耳溫槍。



Accurate – Measures the infrared heat generated by the eardrum and the surrounding tissues.

準確 – 測量耳鼓及周圍組織散發的紅外線熱量。



Audio fever indicator – Number of beeps indicates normal (1 beep), moderate (2 beeps) and high temperature (4 beeps).

發燒響聲指示 – 響聲次數代表：正常 (1次)、輕度發燒 (2次) 及高燒 (4次)。



Memory function – Recalls the last temperature taken.

記憶功能 – 可記憶上一次測量結果。



Suitable for newborns.

適合初生嬰兒。



21x lens filters included.

21個耳套。

ThermoScan 3 IRT 3030 includes / 包含 :



Braun ThermoScan Infrared Ear Thermometer

百靈耳溫槍 1X



Protective cap

保護蓋 1X



Disposable hygienic lens filters

一次性耳套 21X



3 Volt lithium battery

2032型3V電池 1X



有關更多產品資料，請瀏覽網站 www.braunhealthcare.com

不要單就測溫數據判讀病情

如家長/監護人發現嬰幼兒有任何不良狀況或症狀，應與兒科醫生聯絡。例如，若兒童出現煩躁不安、嘔吐、腹瀉、脫水、癲癇發作等症狀，或食慾或行為發生變化等，即使沒有發燒或出現體溫偏低，仍可能需要就醫。若兒童正在服用抗生素、止痛藥或退燒藥，不宜只憑體溫讀數判讀其病情的輕重。

測量體溫的技巧

為確保衛生及準確地測量體溫，請務必每次更換新的一次性耳套。左右兩耳所測量的數據亦可能存在差異，因此請固定在同一邊耳朵測量體溫。為能準確測量體溫，請確保耳朵內無堵塞物或耳垢。

以下外部因素會影響耳朵的溫度

- 1.測溫頭放置不當
- 2.使用舊耳套
- 3.測溫頭不乾淨

對於以下狀況，請等待20分鐘後再測量體溫

- 1.室溫太熱或太冷
- 2.戴助聽器
- 3.躺在枕頭上
若耳道內滴了耳藥水或其他藥物，請利用另一隻未經用藥的耳朵測量

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

ThermoScan is a registered trademark of Helen of Troy Limited
部份商標為寶潔公司或其關聯公司認可使用。
ThermoScan為 Helen of Troy Limited 的註冊商標。
© 2018 All rights reserved.

總代理：泰豐生技股份有限公司
消費者服務專線：0800-278-789

百靈耳溫槍
藥商名稱：集德醫材管理顧問有限公司
衛部醫器陸輸字第000923號 衛部器廣字第10712010號