

99mm

99mm

99mm

297mm

BRAUN

百靈耳溫槍 IRT6030

你知道如何
準確地為寶寶測溫？



台灣兒科醫師
No.1 推薦品牌¹



台灣媽咪
人氣首選品牌²

功能



背光功能

能在黑暗環境下測量及讀取體溫。



位置偵測器

透過 ExacTemp™ 以顯示燈及提示聲確定測溫頭是否放在正確的測溫位置。

Mx1

記憶功能

可記憶上一次測量結果。



使用安全

百靈一次性耳套可避免交叉感染和確保測溫的準確度。

0+

適合初生嬰兒



測溫準確

預熱測溫頭可將測溫頭在耳道內產生的冷卻效應降低，確保連續測溫的準確度。


如何使用百靈耳溫槍？




從保護盒上取出耳溫槍。



按下電源按鈕。

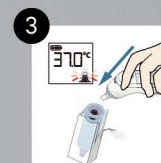


裝上新耳套。

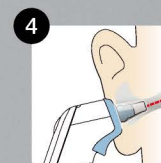

把測溫頭深入耳道。




按下並鬆開測溫頭按鈕。

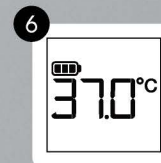

顯示體溫。

每次測溫前請更換新的耳套以確保準確性及衛生。

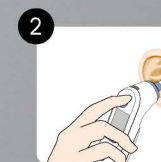

1. 根據 2024 年針對台灣 150 位兒科醫生問卷調查結果顯示。

2. 根據 2023 年 << 媽媽寶寶 >> 菁品大賞票選最佳人氣獎結果。

BRAUN
Better by design.

有關更多產品資料，請瀏覽網站：
tw.BraunHealthcare.com

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.
ThermoScan® and ExacTemp™ are trademarks of Helen of Troy Limited and/or its affiliates.
部份商標為寶潔公司或其關聯公司認可使用。
ThermoScan® 和 ExacTemp™ 為 Helen of Troy Limited 及/或其關聯公司的註冊商標。
© 2025, All rights reserved.

型號：IRT6030
許可證字號：
衛部醫器輸字第 028199 號
品名：百靈耳溫槍
醫療器材商名稱：
集德醫材管理顧問有限公司
衛部醫廣字第 11404007 號

**一鍵快速保固
服務隨行**

- 使用教學
- 產品開箱、耗材提醒
- 體驗課程
- 顧客服務

恒隆行 hengstyle  hengstyle.com

不要單就測溫數據判讀病情

如家長 / 監護人發現嬰幼兒有任何不良狀況或症狀，應與兒科醫生聯絡。例如，若兒童出現煩躁不安、嘔吐、腹瀉、脫水、癲癇發作等症狀，或食慾或行為發生變化等，即使沒有發燒或出現體溫偏低，仍可能需要就醫。若兒童正在服用抗生素、止痛藥或退燒藥，不宜只憑體溫讀數判讀其病情的輕重。

測量體溫的技巧

為確保衛生及準確地測量體溫，請務必每次更換新的一次性耳套。左右兩耳所測量的數據亦可能存在差異，因此請固定在同一邊耳朵測量體溫。為能準確測量體溫，請確保耳朵內無堵塞物或耳垢。

(為保持最佳性能，我們建議使用鹼性電池。)

以下外部因素會影響耳朵的溫度

- 測溫頭放置不當
- 使用舊耳套
- 測溫頭不乾淨

對於以下狀況，請等待 20 分鐘後再測量體溫


- 室溫太熱或太冷
- 戴助聽器
- 躺在枕頭上

若耳道內滴了耳藥水或其他藥物，請利用另一隻未經用藥的耳朵測量。


Braun 百靈耳溫槍

百靈 ThermoScan® 耳溫槍透過耳鼓及周圍組織產生的紅外線熱力測量體溫。由於耳膜與腦部的體溫調節中樞共用一條血管，因此百靈 ThermoScan® 耳溫槍能準確測量人體中心體溫的變化。

百靈 IRT 6 系列 (係指型號 6 開頭產品)，配有 ExacTemp™ 位置偵測器，以顯示燈及提示聲輔助放在正確的測溫位置，更配備“預熱測溫頭”，開機後快速將測溫探頭預熱，以降低探頭在耳道內產生的冷卻效應，確保測溫的準確度。

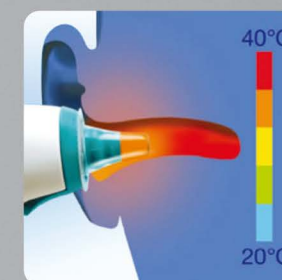

百靈耳溫槍

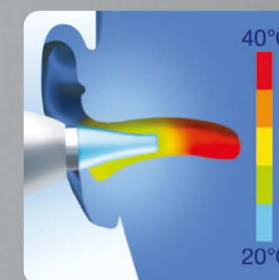

其他耳溫槍